

Σανίδα Μεταφοράς / Transfer Board

Σανίδα μεταφοράς: Ο κεκλιμένος σχεδιασμός της σχηματίζει μια μικρή ράμπα τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, ώστε ο ασθενής να μετακινείται εύκολα και αβίαστα. Διαθέτει αυλακώσεις που το βοηθούν να ολισθαίνει, ταυτόχρονα. Το σχήμα αυτό το καθιστά πιο ανθεκτικό στο βάρος.

Είναι χρήσιμο στη μεταφορά ασθενών από αναπηρικό αμαξίδιο σε κρεβάτι, από αναπηρικό αμαξίδιο σε καρέκλα κ.λπ.

Transfer board: Its sloping design forms a small ramp at both entry and exit so that the patient can be moved easily and effortlessly. It has grooves to help it slide. At the same time this figure makes it more resistant to weight.

It is helpful in transferring patients from wheelchair to bed, from wheelchair to chair, etc.

Τεχνικά χαρακτηριστικά / Technical features

- Κατασκευασμένο από λευκό πλαστικό. / Made of white plastic.
- Διαστάσεις: 71 x 21 cm / Measurements: 71 x 21 cm
- Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 100 Kg / Max. Weight cap: 100 Kg

Οδηγίες χρήσης / Instructions for use

Θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των δύο σημείων από και προς τα οποία θέλουμε να μετακινήσουμε τον ασθενή μας. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να ελέγχουμε ότι η σανίδα μεταφοράς είναι σταθερή και ασφαλής (και δεν στηρίζεται μόνο από τα άκρα της). Μόλις είμαστε σίγουροι, μπορούμε να αρχίσουμε να ολισθαίνουμε τον ασθενή μέχρι να φτάσει στο άλλο επιθυμητό σημείο.

It should rest between the two places we want to move our patient from and to. First of all, we should check that the transfer board is stable and safe (and it does not lay only by its ends). Once we are confident, we can begin to slide the patient until they reach the other desired point.

Συντήρηση / Maintenance

- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό του προϊόντος.
Do not use abrasive detergents to clean the product.
- Ένα μαλακό πανί και ζεστό σαπουνόνερο αρκούν συνήθως για να το διατηρήσετε καθαρό.
A soft cloth and warm soapy water are usually sufficient to keep it clean.
- Μην χρησιμοποιείτε υλικά που μπορούν να χαράξουν το πλαίσιο.
Do not use materials that can scratch the frame.
- Στεγνώστε το προσεκτικά μετά από κάθε καθαρισμό
Dry it carefully after each cleaning

Εγγύηση / Warranty

Τα προϊόντα μας είναι εγγυημένα έναντι τυχόν κατασκευαστικών ελαττωμάτων για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στους γενικούς όρους πώλησης.

Our products are guaranteed against any manufacturing defects for one year from the date of the invoice. For more information please refer to our general sale conditions.

Προειδοποίηση / Notice

Κάθε σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με το προϊόν πρέπει να αναφέρεται στην Suciores de Manuel García, S.L: και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Any serious incident related to the product must be reported to Suciores de Manuel García, S.L: and to the competent authority of the Member State in which the user and / or patient are established.

Mobiak Ref. 0808517

Garcia Ref. 2345

ΣΑΝΙΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

TRANSFER BOARD



García 1880 - Suciores de Manuel García S.L. CIF B12321162
Distribuido por/Distributed by Walking Sticks Int. S.L. CIF B12486684
Carretera de Castellnovo, Km 0, 12400 Segorbe (Castellón), Spain
Tel.: +34 964 71 03 22 - e-mail: comercial@garcia1880.com
www.garcia1880.com

DISTRIBUTED BY

MOBIK S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com